



دستورالعمل مانیتورینگ محیطی

- ✚ دستگاه دزیمتری را قبل از کار شارژ نمایند.
- ✚ در تمام مدت کار با اشعه در اتاق هات لب، اتاق تزریق و کار با بیمار، ناحیه تحت کنترل، و اتاق پسمان از روشن بودن و عملکرد صحیح دزیمتر مطمئن باشند.
- ✚ قبل از شروع کار مقدار اولیه را خوانده در دفتر مخصوص ثبت نمایند.
- ✚ سیستم را بر روی عدد صفر تنظیم نمایند.
- ✚ پس از اتمام کار عدد ثانویه دزیمتر را خوانده و ثبت نمایند.
- ✚ اعداد بدست آمده نباید بیش از 10 میکرو سیورت بر ساعت در ناحیه تحت کنترل و بیشتر از 1 میکرو سیورت بر ساعت در ناحیه تحت نظارت باشد.
- ✚ چنانچه دزیمتری سطوح کار، آلودگی با ماده رادیو اکتیو را نشان می دهد بر طبق دستورالعمل رفع آلودگی اقدام نمایند.
- ✚ از کالیبره بودن سیستم مطمئن شده و هر سال کالیبراسیون را تکرار نمایند.